

乳幼児向けおひるね見守りロボット

# smile baby

## スマイルベイビー

マットの上にお子様を寝かせるだけで、  
心拍、呼吸、体動等の生体情報が  
離れたところからリアルタイムで  
確認できます。

マットレスの下にセンサーマットを敷くだけなので、  
簡単に設置できます。  
体に器具などを付けずに布団に寝るだけなので、  
お子様は違和感なくお休みいただけます。  
万が一お子様に異変があった場合は、  
アラートでお知らせします。



センサーマットから感知される  
心拍、呼吸、体動の生体情報を  
サーバーを通してモニターに表示します。

### 仕様

撥水素材を使用しているため、  
拭くだけでお手入れができます。

センサーマットには折り目がある  
ので、2つ折りコンパクトに  
収納が可能です。

マット部は電気を一切使用しない  
エアーク式。安全で故障の少ない  
安心設計です。

独自開発の特許技術、  
超高感度センサー内蔵。

モバイルバッテリーを使用することで  
コードレス化を実現しました。



センサーはベビー布団の下にちょうど  
収まるサイズです。ベビーベッド、  
コトでの使用も可能です。

年齢制限、体重制限がなく、全ての  
お子様にご使用いただけます。

smile baby


**B018-SB001P (ピンク)**  
**B018-SB001LB (水色)**  
**B018-SB001Y (黄色)**  
**B018-SB001G (緑)**

セット内容 smile baby本体(センサーマット)、  
モバイルバッテリー、  
モバイルバッテリー用USBケーブル

■サイズ(mm) センサーマット:W480×D600×H12  
センサーユニットカバー:W200×D200×H35  
センサーユニット:W102×D144×H24.6

## 広範囲で検知

センサーは8本仕様なので、お子様がお布団のどの位置で眠っていてもしっかりデータが取れるようになっています。

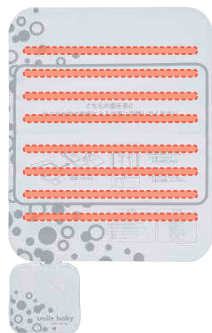


## お布団の下に敷くだけのかんたん設置

センサー本体を下に敷いた布団にお子様ที่寝るだけ。離れたところからリアルタイムでお子様の心拍、呼吸の状態をモニタリングできます。




## ローカルでのシステム利用の場合

- センサーマットからの情報は、アクセスポイント（ルーター）を通して管理マスターサーバーへ集約されます。

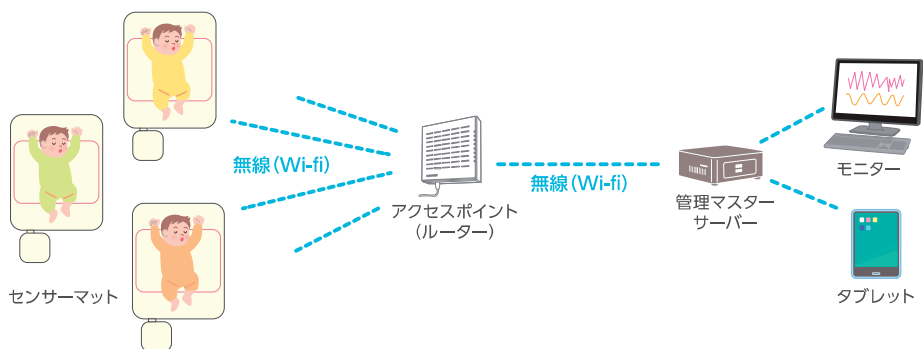

### システム構成

センサーマット + アクセスポイント (必要数) + 専用管理マスターサーバー (必要数) +  
モニターセット (モニター、キーボード、マウス) or 専用タブレット

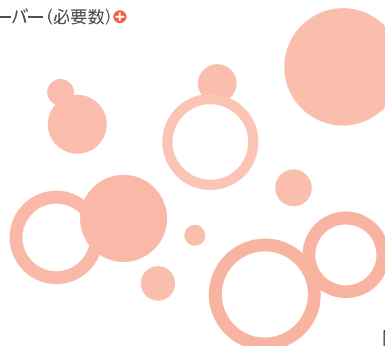


## 見守り、お知らせ

一覧画面で全員分を見守り。異変があった場合には、どのお子様に異変が起きているか一目でわかります。また、異変があった場合のアラート音はセンサー本体ではなくモニター機器で鳴るため、お子様の安眠を妨げません。



## 見守り履歴、履歴帳票の作成

見守りの履歴が30日分保存され、表やグラフで表示できます。履歴帳票の作成機能も備えています。

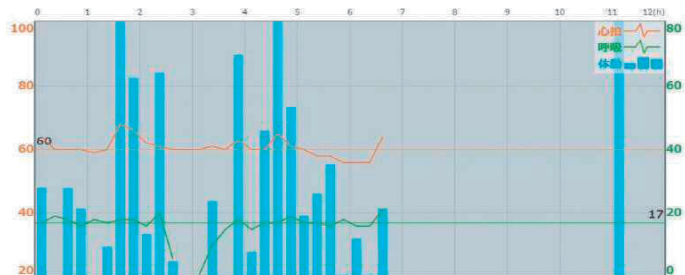

## お客さまのお声

複数名のお子様の状態を同時にモニターで確認できて、どのセンサーでアラートが発生したかがすぐにわかる。



センサーマットから離れた場所でアラート音が鳴るので、お子様の安眠を妨げない。



お子様がお布団から離れていないかも確認できる。



センサーマットがお子様の体に直接触れないので、かぶれたりする心配がない。



コードレスなので、コードに足を引っ掛けて転倒するリスクが少ない。  
また、ボタン電池等を使用していないため、誤飲のリスクも少ない。

### COLUMN

#### SIDS(乳幼児突然死症候群)とは

SIDSは、何の予兆や既往歴もないまま乳幼児が死に至る、原因の分からない病気で、窒息などの事故とは異なります。

平成29年には77名の赤ちゃんがSIDSでなくなっており、乳児期の死亡原因としては第4位となっています。

(厚生労働省 ホームページより抜粋)



【製造元】

株式会社バイオシルバー **bio silver**

〒222-0033

神奈川県横浜市港北区新横浜2-14-4 シルバービル1F

FAX:045-548-5289 <http://www.biosilver.co.jp>

お問い合わせ ▶ **045-548-5478**